

ダキンキャスト POPバンデージ



均一の品質

非常にスムーズでソフトタッチ、しかも強力です。

経済的

他社製品に比べて少量でハイパワーを維持するため経済的です。

他に類のない特長

独自の製造でユニークなキャストです。

〔使用方法〕

- (1) キャスト装着部分にストッキネットでカバーし、コットンバンデージで固定します。
- (2) 15～20℃の温水の中に漬けてロールの中心まで浸透させ、ねじったり絞ったりします。
(その際、温水の温度が高ければ高いほど、硬化時間が短縮されます。)
あまりにも高温すぎると、キャストが剥がれ落ちたり、力が減少する恐れがあります。
- (3) バンデージの1/2～2/3が重なるように患部に巻いてください。
- (4) 数回手で押さえてモールドします。この時しっかりモールドすればするほど、強力になり硬化時間も短縮されます。
- (5) 製品は乾燥した涼しい場所に保管してください。

株式会社 岩 城 器 材
〒577-0013 東大阪市長田中5-3-1
(06)6744-9472 Fax(06)6744-9410