

# Suprasorb® F Film dressing

売店/薬店様 販売向け用



## スープラソープ F フィルムドレッシング

ロールタイプ 非滅菌

エコノミータイプ 10cm x 1m



医療用具許可番号：27BY6045

材質は、水蒸気透過性の高い、ポリウレタンフィルムを使用し、外部からの液体やバクテリア等の浸入を防ぎ、水蒸気は、身体から分子状態で通過します。

注意：本品は未滅菌ですので、直接創傷部などには貼り付けしないで下さい。



非滅菌製品のロールタイプで装着部に合わせて必要な長さにカットできます

1mロールなのでご自宅での使用に有効で経済的に御使い頂けます。

### 取扱方法 2重構造で取扱は簡単です。

持ち手部分が赤いタブになっていますのでどなたでも簡単に貼れます

装着時ドレッシングの粘着面に指が触れません



1 ロールから必要な長さをカットします。



5 フィルムドレッシングの粘着側を装着部に向けま



2-3 赤いストラップを外側へめくると、装着補助シールが粘着フィルムから剥がれます。



5 軽く伸ばしながら皮膚にしっかりと装着します。(周囲をしっかりと粘着して下さい。)



6 装着補助シールを取り除きます。

### 用途

- ・褥創のできやすい部分の保護
- ・ドレッシング材の固定や、チューブ固定
- ・シャワー入浴時にガーゼ、パッドの上から貼り傷口の保護に、使用できます。

### 特長

- ・皮膚かぶれのおきにくい、肌に優しい粘着剤を使用し、患者様の負担がなくドレッシングを剥がす事ができ、剥がした後は、跡が残りにくく、快適な使用感があります。
- ・透明度は高く、装着皮膚部分の確認が容易です。
- ・固定日数は、約7日可能です。

### スープラソープF フィルムドレッシング、ロールタイプ、非滅菌

製品番号	サイズ	1カートン	定価(税別)
20467	10cm x 1M	16ロール	900円(1ロール)

製造元 ドイツ ローマンラシア社 大阪府東大阪市長田中5-3-1  
 輸入販売元 株式会社 岩城器材 電話 06-6744-9472  
 URL: <http://www.iwaki-kizai.co.jp> ファックス 06-6744-9410

弊社インターネット上での販売も行っております (アドレスは上記に記載)